

Anleitung zum Anlegen der AirFit P10 für AirMini



- Richten Sie das linke (L) und rechte (R) Polster in Richtung Ihres linken und rechten Nasenlochs aus.




- Ziehen Sie die Kopfbänder über den Kopf, sodass sich das untere angenehm über Ihren Hinterkopf legt und das obere auf dem Scheitel sitzt.



- Die Kopfbänder lassen sich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie diese auseinander ziehen, sitzen sie lockerer. Für einen festeren Sitz ziehen Sie die Riemen wieder zueinander.



- Ziehen Sie die Maske vom Gesicht weg und setzen Sie sie wieder auf.
- Prüfen Sie, dass die Polster fest und aufrecht in den Nasenlöchern sitzen.

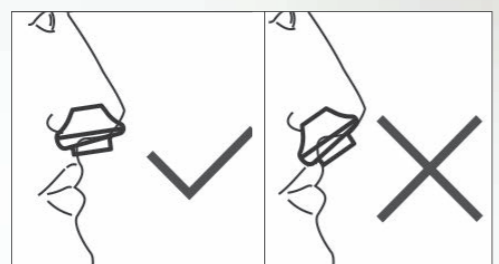

- Sie können Ihre Maske jetzt verwenden. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, sollten Sie einen leichten Luftzug am Schlauch spüren.



Einsetzen des HumidX oder HumidX Plus



- Um die wasserlose Befeuchtung einzusetzen, öffnen Sie das Befeuchtungsmodul mit einer Drehbewegung.



- Setzen Sie nun den gewünschten Befeuchter ein: HumidX oder HumidX Plus. Beginnen Sie mit HumidX und steigen Sie nur bei Bedarf auf HumidX Plus um.



- Drehen Sie nun das Modul wieder zusammen.

Hinweis: Ausführliche Informationen und Anleitungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der AirFit P10 für AirMini.

Einfach bequem

Die Nasenpolstermaske AirFit™ P10 für AirMini™ vereint den Tragekomfort und das freie Sichtfeld der etablierten AirFit P10 Maske mit der neuen wasserlosen Befeuchtung HumidX™ des AirMini-Systems. Mit der speziell für das AirMini-Therapiegerät entwickelten AirFit P10 für AirMini erhalten Patienten eine kompakte und reisefreundliche Therapielösung. So müssen sie auch unterwegs nicht auf die Vorteile ihrer Therapie verzichten.




Die Grundlage: AirFit P10

Die AirFit P10 ist 50 % leiser und 50 % leichter als ihr Vorgänger, die Swift™ FX.¹ Die mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Maske hat sich zu einer der beliebtesten Nasenpolstermasken von ResMed entwickelt.


Gemäß einer klinischen Studie waren 79 % der Patienten, die die AirFit P10 nach 2 Wochen noch verwendeten, auch nach 8 Monaten weiterhin in Therapie.

Außerdem therapierten Patienten bei Verwendung der AirFit P10 rund 40 Minuten länger pro Nacht.¹

Daher eignete sich die AirFit P10 ideal für die Verwendung mit dem AirMini-System.

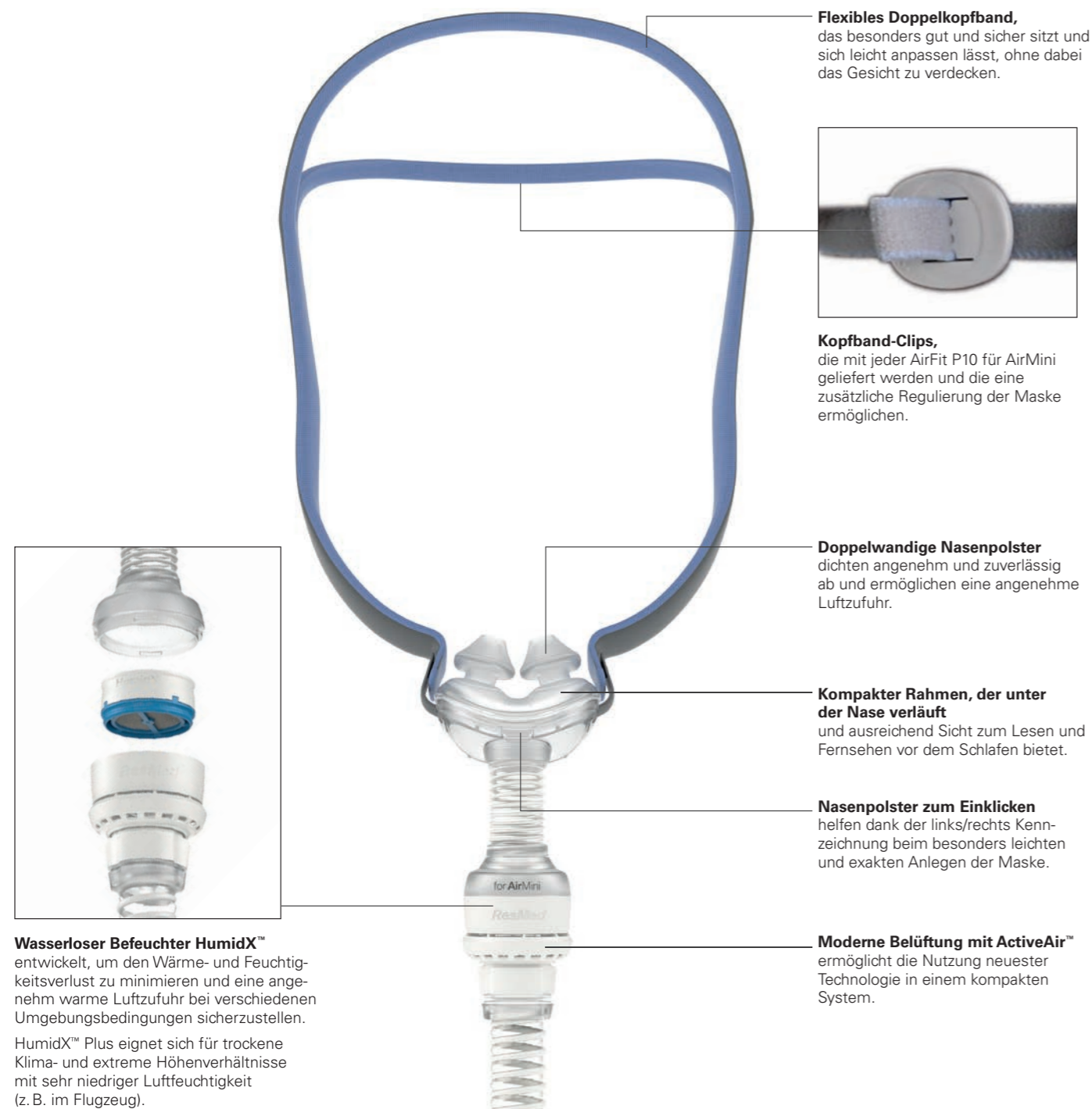

Leichtes Anlegen, Reinigen und Zusammensetzen

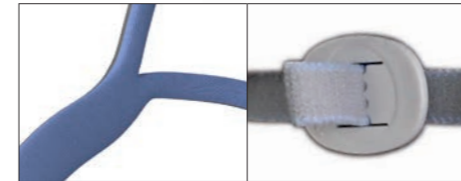

Doppelkopfband
62935 Standard
62936 Small, for Her

AirFit P10 Clips
62962 (1 Pck. mit 2 Clips)



HumidX
38809 (3 Stk.)
38810 (6 Stk.)
38808 (50 Stk.)*

HumidX Plus
38812 (3 Stk.)
38813 (6 Stk.)
38811 (50 Stk.)*



Nasenpolster
62930 (XS) Extra Small
62931 (S) Small
62932 (M) Medium
62933 (L) Large



Artikelnummern Maskensystem

P10 AirMini Masken-Set	38824
- 1x Maske AirFit P10 für AirMini	
- 1x HumidX	
- 1x HumidX Plus	
- 1x AirMini Schlauch	

¹ Klinische Studie FECS3 von ResMed. Die objektiven ResMed Daten (Druck, Leckage, durchschnittliche tägliche Nutzung, AHI) wurden bei einer Stichprobe von 21 Teilnehmern ermittelt.

² Al. Wimmers, K. Hall, C. Ziegenbein, H. Woehrlé - Increase in the number of patients remaining on CPAP therapy. ResMed White Paper, ResMed Science Centre, ResMed, München, Deutschland. 2014.

* verfügbar nur für Fachhändler

AirFit™ P10

for AirMini