

**PHILIPS**

DreamWear

# Anpassanleitung DreamWear Masken




DreamWear Nasenmaske

DreamWear Silikonkissen

DreamWear Full Face

# DreamWear – Anleitung zur Anpassung der Masken

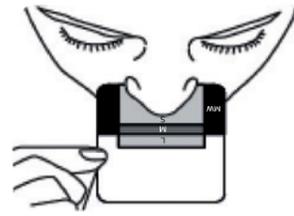

Um die Größe des Maskenkissens zu bestimmen, nutzen Sie bitte die mitgelieferte Anpassschablone.

Bei der Full Face und Nasenmaske halten Sie die Schablone waagrecht unter die Nase. Die passende Maskenkissengröße entspricht den Kontaktstellen zwischen Anpassschablone und dem äußeren Rand der Nasenflügel bzw. der Nasenspitze. Die Maskenkissenöffnung sollte direkt unter den Nasenlöchern liegen.

Bei der Silikonkissen Maske führen Sie die Spitzen des Kissens in die Nasenlöcher ein. Wählen Sie das Kissen so aus, dass die Kissen bequem und ohne Zwischenräume unter der Nase sitzen.

**Hinweis: Es stehen vier Kissengrößen zur Auswahl (S, M, L, MW). Weitere Informationen zur Anpassung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.**



DreamWear  
Nasenmaske



DreamWear  
Silikonkissen



DreamWear  
Full Face

1

Das Maskenkissen sollte so anliegen, dass möglichst wenig Luft entweichen kann. Bei der Full Face und Nasenmaske darf die Nase sich nicht innerhalb der Maskenkissenöffnung befinden. Wenn Teile des Maskenkissens über die Nase hinausgehen, wird das Maskenkissen falsch getragen. Es kann eine andere Kissengröße erforderlich sein.



2

Maskenrahmen, Kopfband und Kissen werden zusammengesetzt und das Maskenkissen unter der Nase platziert.



3

Positionieren Sie den Rahmen oben auf dem Kopf und ziehen Sie das Kopfband über den Hinterkopf.

**Hinweis: Bringen Sie bei der Full Face die magnetischen Kopfbandclips am Maskenkissen an.**



4

Um den Sitz der Masken zu justieren, werden zunächst die Laschen des Kopfbandes von den Stoffteilen abgezogen. Dann sollte die Länge der Bänder angepasst werden. Zur Befestigung sind die Laschen wieder an den Stoff anzudrücken. Wiederholen Sie diesen Schritt für die unteren Laschen der Full Face Maske.

**Hinweis: Ziehen Sie das Kopfband nicht zu fest an.**




5

Verbinden Sie den Schlauch mit dem Anschlussstück der Maske oben auf dem Kopf. Letzte Einstellungen bis hin zu einem komfortablen Sitz der Maske sollten im Liegen bei eingeschaltetem Therapiegerät vorgenommen werden. Nach Abschluss der Maskeneinstellung sollte der abgewinkelte Schlauchanschluss auf der Kopfoberseite mittig aufliegen.



# Einfach die richtige Passform finden

Den meisten Trägern passt die mittlere Maskenrahmengröße (MED). Sollte diese Größe nicht zufriedenstellend sitzen, sollte der kleinere oder größere Maskenrahmen gewählt werden.

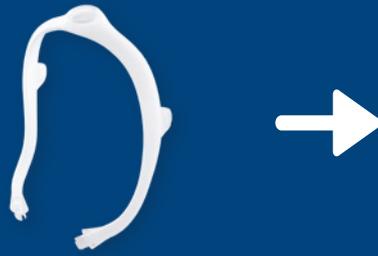


Mittlerer Rahmen passend



Richtige Passform



Rahmen zu klein

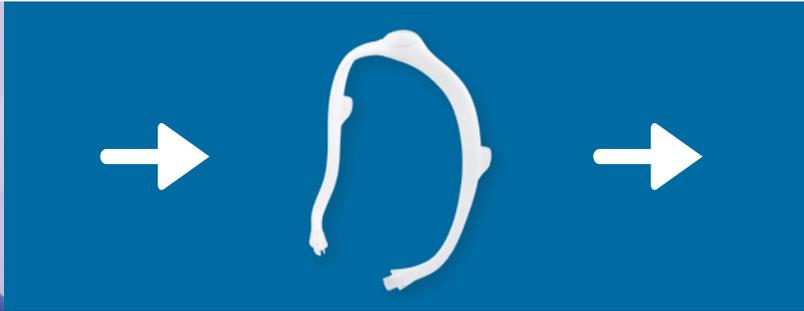

Wechseln auf großen Rahmen



Richtige Passform



Rahmen zu groß



Wechseln auf kleinen Rahmen



Richtige Passform



## Maskenkissen tauschen und reinigen

Zum Austausch des Maskenkissens drücken Sie das Kissen am Anschluss zum Rahmen mit Zeigefinger und Daumen vorne und hinten zusammen und ziehen Sie gleichzeitig Rahmen und Kissen auseinander. Waschen Sie die Einzelteile der Maske täglich mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel und lassen Sie sie an der Luft trocknen.



## Magnetische Clips bei DreamWear Full Face

Die Kopfbandclips und das Maskenpolster der DreamWear Full Face enthalten Magnete, um das Kopfband einfach am Kissen vorne befestigen zu können.

**Hinweis:** Einige medizinischen Geräte können durch Magnetfelder beeinträchtigt werden. Für Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Cochlea-implantaten ist daher besondere Vorsicht geboten. Bitte beachten Sie die gesonderten Anwendungshinweise in der Gebrauchsanweisung.